

Kurzbedienungsanleitung O-zwei® mobil

Hilfsmittel-Pos.-Nr.: 14.24.04.1001
Kategorie: Sauerstoffkonzentrator mobil / tragbar
- Sauerstoff aus dem Koffer, atemsynchron-

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des O-zwei® mobil die vollständige Bedienungsanleitung. Diese Kurzform dient lediglich als Hilfe im täglichen Gebrauch.

Aufstellung: Bitte stellen Sie das O-zwei® mobil an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Die Luftein- und -austrittsöffnungen müssen besonders an der Geräteunterseite frei sein. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer Überhitzung des Gerätes und somit zur Leistungsminderung führen.

Anwendung: Die Sauerstofftherapie wird durch die tägliche Nutzungsdauer in Verbindung mit dem Flow bestimmt. Beide Werte sind einzuhalten und sind nicht gegeneinander aufrechenbar.

O₂-Gabe: Das **Tragen der Nasenbrille** ist während der Nutzung notwendig, da **sonst kein O₂** abgegeben wird. Beim Nichttragen wird „Nichtabnahme von Sauerstoff“ signalisiert. Das ist kein Gerätefehler! Dieses Signal erlischt nach einer Einatmung.

**Feuer-
gefahr:** Während des Betriebs und auch nach dem Abschalten ist Sauerstoff im Gerät gespeichert. Rauchen und Umgang mit offenem Feuer sind im Umkreis von 3 m um das Gerät einschließlich der Zubehörteile untersagt!

Bei der Nutzung ist kein Befeuchter notwendig bzw. zugelassen!

Einschalten

1. Einstellung des Sauerstoffflusses am Flow-Steller
2. Netzanschlußkabel in Gerät und Steckdose 230 V/50 Hz stecken
3. Netzschalter (Seitenteil) einschalten
4. Betriebsschalter (Oberseite) betätigen, **Nasenbrille erst nach der Startphase (4 x Signalton, 15 s Dauer) anlegen oder bewegen**
5. Nasenbrille auf Sauerstoffauslaß stecken

Ausschalten

1. Betriebsschalter (Oberseite) betätigen, Betriebsanzeige erlischt
2. Netzschalter (Seitenteil) ausschalten
3. Nasenbrille abnehmen

Wartung: wöchentlich: Reinigung des Grobstaubfilters (Austausch nach ca. 3 Monaten)
wöchentlich: Test der internen Batterie
4- bis 8-wöchentlich: Auswechseln des Feinstaubfilters

Zubehör	Erklärung	Artikel-Nr.
Verbindungsschlauch mit Sauerstoffbrille für Erwachsene	Typ Kendall 13304, Länge 427 cm	102.006.8
Staubfilterfilter (Set)	1 Grobstaubfilter, 2 Feinstaubfilter	102.008.8
Spannungswandler	für den Pkw-Betrieb	102.004.8
Transport-Rolli	Caddy als Transporthilfe	102.005.8
Fernbedienung FB01	Fernsteuerbarkeit	102.002.0

Änderungen im Sinne des wissenschaftlich-technischen Fortschritts vorbehalten.
air-be-c Beatmungstechnik GmbH, Wiesestraße 107, 07548 Gera, Deutschland

Stand Januar 2001